

## **ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE AMOSTRAS PARA VIGILÂNCIA DE AAT EM ABATEDOUROS AOS LABORATÓRIOS DA CIDASC.**

### **- Quanto as amostras:**

- 1) Enviar somente as amostras de soro não hemolisadas;
- 2) Identificar de forma legível e indelével as amostras;
- 3) Identificar o frasco da amostra com o número sequencial da requisição, e não pelo número do brinco ou código da propriedade. Por exemplo: 1, 2, 3, 4 ... e assim sucessivamente até o número total de amostras existentes;
- 4) Respeitar a capacidade máxima do tubo de acondicionamento, pois ao congelar o conteúdo expande e abre a tampa do tubo. (Exemplo: tubo eppendorf de 2 ml acondicionar em torno de 1,5 ml de amostra, sempre deixando espaço para o aumento de volume após congelamento).

### **- Quanto à embalagem:**

- 1) Utilizar sempre gelo em gel em quantidade suficiente para manter a amostra em temperatura inferior a 8°C até o destino.
- 2) Acondicionar as amostras em sacos plásticos ou plástico filme e não deixá-las "soltas" no isopor para evitar perdas e/ou extravasamento. Pode-se colocar também em uma embalagem secundária vedada (exemplo: um pote plástico com tampa rosqueável) e organizá-las preferencialmente em posição vertical para evitar vazamentos.
- 3) Fixar a requisição no lado externo da caixa de isopor dentro de um saco plástico.

### **- Quanto ao envio:**

- 1) Enviar sempre no início da semana, segundas ou terças-feiras, e verificar a existência de feriados que podem prolongar o prazo de entrega no destino.
- 2) Caso as amostras sejam encaminhadas por caminhão frigorífico, ainda assim, é necessário entregar as amostras em caixas de isopor com gelo em gel em quantidade suficiente para manter a amostra em temperatura inferior a 8°C.
- 3) Estar atento ao horário de funcionamento de cada unidade laboratorial:  
Chapecó – 8h às 12h e das 13:30 às 17:30h.  
Joinville - 8h às 12h e das 13h às 17h.

### **- Quanto à requisição:**

- 1) Preencher todos os campos da requisição e da nomeação ao portador, os dados de e-mail, telefone e nome do veterinário requisitante são obrigatórios.
- 2) Assinar e carimbar as requisições.
- 3) Campos não utilizados devem ser obrigatoriamente inutilizados com traços.
- 4) Encaminhar a requisição digitalizada em arquivo PDF editável, disponível no site da CIDASC.
- 5) Quanto ao número do brinco na requisição, preencher apenas com o número de manejo, ou o número de manejo + dígito verificador (sete últimos dígitos).